

Sistema de reposicionamiento Comfort Glide



**Mayor
seguridad
mayor
eficiencia**



¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS PRESENTES EN EL REPOSICIONAMIENTO DE PACIENTES?

Lesiones de los profesionales

Los profesionales sanitarios sufren algunos de los índices más altos de lesiones musculoesqueléticas por sobreesfuerzo, lo que se traduce en días de trabajo perdidos, permanencia reducida y millones en costes directos e indirectos.^{1,2,3}

Gestión de úlceras por presión

A pesar de los avances en la tecnología de los colchones, los pacientes inmóviles todavía corren el riesgo de desarrollar lesiones por presión. Las úlceras por presión intrahospitalarias no solo son perjudiciales en términos de atención a los pacientes, sino que también cuestan dinero a los hospitales en forma de tratamientos y hospitalización prolongada.

32 %

El levantamiento y manipulación representan más de un tercio de las lesiones de los profesionales, dando lugar a bajas por enfermedad prolongadas (más de 7 días)⁴

1 de cada 4

enfermeros/as se ha ausentado del trabajo debido a una lesión de espalda⁵

23 %

Hasta un veintitrés por ciento de los pacientes hospitalarios desarrollará una úlcera por presión.⁶

1 hora

Los pacientes pueden comenzar a desarrollar una úlcera por presión en una hora⁷

COMFORT GLIDE ES LA SOLUCIÓN

Comfort Glide proporciona a los profesionales sanitarios las herramientas necesarias para movilizar, reposicionar, girar y alzar a los pacientes según los requisitos para el manejo seguro de pacientes en su centro.

El manejo seguro de pacientes es igualmente importante tanto para los pacientes como para los profesionales. Se recomienda el cambio postural frecuente facilitado mediante ayudas de transferencia con los que reducir la fricción y la cizalla para prevenir el desarrollo de lesiones por presión.⁸

Ventajas para el profesional sanitario

- » Proporciona las herramientas adecuadas para que los profesionales sanitarios reposicionen a los pacientes
- » Mejora la seguridad y el bienestar de los trabajadores
- » Facilita el seguimiento de los protocolos del centro

Ventajas para el paciente


- » Las cuñas proporcionan la inclinación de descarga recomendada por el Panel Consultivo Europeo para las Úlceras por Presión EPUAP.
- » El protector anti humedad mantiene la piel del paciente siempre seca.
- » El sistema Comfort Glide proporciona una mejor experiencia para el paciente y mejora los resultados.



Sábanas para reposicionamiento Comfort Glide – [página 5](#)



Cuñas Comfort Glide – [página 6](#)

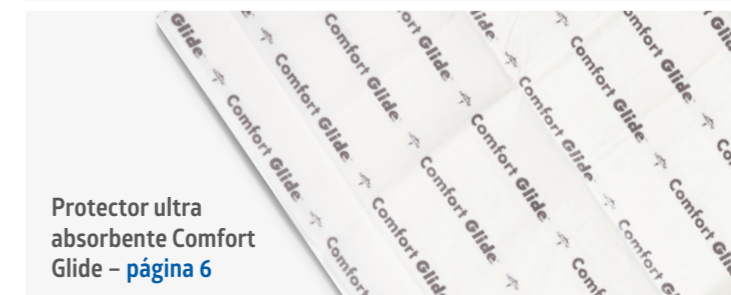

Protector ultra absorbente Comfort Glide – [página 6](#)



Longitud:
198 cm XL

Longitud:
139 cm
estándar

Reduzca el esfuerzo en realizar los cambios posturales de los pacientes

Intuitivas y fáciles de usar, las sábanas para reposicionamiento Comfort Glide cuentan con la seguridad necesaria para acomodar a todo tipo de pacientes gracias a su capacidad de soportar 179 kilogramos de peso en la versión estándar y 415 kilogramos en la versión XL.⁹

Sábanas para reposicionamiento Comfort Glide

Estas sábanas están diseñadas y probadas para ayudar a reducir el esfuerzo necesario para el cambio postural de los pacientes.


- » La superficie inferior de nylon de baja fricción requiere un 35 % menos de esfuerzo que una sábana tradicional para iniciar y mantener el deslizamiento.¹⁰
- » Múltiples asas para optimizar la distribución del peso y el alzamiento.
- » Los materiales permeables al aire permiten que la sábana permanezca debajo de los pacientes durante un periodo de tiempo prolongado y que esté siempre disponible para ayudar en el reposicionamiento.¹¹
- » Una capa de microfibra suave y transpirable cubre toda la superficie superior para mayor comodidad del paciente y es compatible con colchones de baja pérdida de aire.¹¹



La base empírica

Fuerza media requerida para iniciar el deslizamiento


Este gráfico muestra la fuerza necesaria para iniciar el deslizamiento de un objeto de 91 kg sobre una cama de hospital.¹² Cuanto menor sea el número, más fácil es para los profesionales sanitarios iniciar el deslizamiento de un paciente.

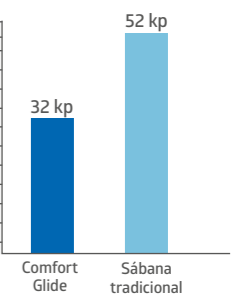

kp = kilopondio

Ensayo WVTR de transpiración

La velocidad de transmisión de vapor de agua (WVTR, por sus siglas en inglés) en unidades g/(m²*día) mide la cantidad de vapor de agua que pasa a través del material. Cuanto mayor sea el número, mayor transpiración del material.¹³

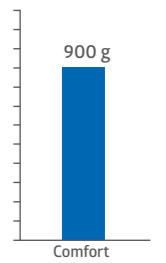

g = gramos, m² = metros cuadrados

¿Está buscando una solución reutilizable?



Con el fin de satisfacer las necesidades de su centro, también ofrecemos unas sábanas de reposicionamiento Comfort Glide reutilizables. La sábana reutilizable también está disponible en los tamaños estándar y XL.

Descargue la presión con facilidad en los puntos de alto riesgo



Cuñas Comfort Glide

Las cuñas de espuma de alta densidad ayudan a mantener a los pacientes en la posición de inclinación de 30 grados recomendada por el Panel Consultivo Europeo para las Úlceras por Presión EPUAP, reduciendo la presión sobre las prominencias óseas.¹⁴

- » La base antideslizante se agarra a la superficie de cualquier colchón o sábana.
- » Las flechas hacia abajo «Down» garantizan una colocación adecuada.
- » El suave revestimiento de composite puede limpiarse con un paño.
- » Ofrecemos variedad de cuñas para único paciente y reutilizables incluyendo talla estándar y XL.

Fomenta la seguridad de la piel con una gestión efectiva de la humedad



Protector ultra absorbente Comfort Glide

Los protectores ultra absorbentes están diseñados para controlar la humedad durante un largo periodo de tiempo y mantener la piel del paciente seca.

- » Absorbe la humedad, la mantiene alejada de la piel y está seca al tacto en cuestión de minutos¹⁵
- » Permeable al aire para una comodidad óptima del paciente con cero penetraciones^{15,16}
- » Compatible con colchones de baja pérdida de aire¹⁵
- » Tamaños estándar (91 x 144 cm) y XL (101 x 203 cm) disponibles diseñados para cubrir completamente las sábanas de reposicionamiento
- » Muestras disponibles a petición del interesado

Compre únicamente lo que necesite con un pedido personalizado

Sábanas Comfort Glide, para un solo paciente

Referencia	Descripción	Invasado
CGSHEET	Sábana deslizante, 88,9 x 139,7 cm, con correas, capacidad de 179 kg de peso	12/envase
CGSHEETNS	Sábana deslizante, 88,9 x 139,7 cm, capacidad de 179 kg de peso	12/envase
CGSHEETXL	Sábana deslizante, XL, 106,7 x 198,1 cm, 2 correas opcionales, capacidad de 415 kg de peso	12/envase



Sábanas Comfort Glide, reutilizables

Referencia	Descripción	Invasado
CGSHEETR	Sábana deslizante reutilizable, 88,9 x 139,7 cm, capacidad de 141 kg de peso	12/envase
CGSHEETRXL	Sábana deslizante reutilizable, 106,7 x 198,1 cm, capacidad de 293 kg de peso	12/envase



Cuñas de espuma Comfort Glide, un solo paciente

Referencia	Descripción	Invasado
CGWEDGE	Cuñas de espuma de 30 grados, base antideslizante: 27,9 x 12,7 x 40,6 cm	2 uds/paquete, 6 uds/caja
CGWEDGEXL	Cuñas de espuma de 30 grados, base antideslizante: 38,1 x 16,5 x 40,6 cm	2 uds/paquete, 4 uds/caja



Cuñas de espuma Comfort Glide, reutilizables

Referencia	Descripción	Invasado
CGWEDGE-R	Cuñas de espuma de 30 grados, base antideslizante: 40 x 26 x 12,7 cm	2 pares/caja
CGWEDGE-RXL	Cuñas de espuma de 30 grados, base antideslizante: 38 x 40,6 x 16,5 cm	1 par/caja



Protectores ultra absorbentes Comfort Glide, un solo paciente, desechables

Referencia	Descripción	Invasado
CGDRYPAD	Protector ultra absorbente, 91,4 x 144,8 cm	5 uds/bolsa, 60 uds/caja
CGDRYPADXL	Protector ultra absorbente XL, 101,6 x 203,2 cm	5 uds/bolsa, 40 uds/caja



ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE



Instrucciones del producto

MEDLINE
COMFORT GLIDE

Instrucciones de uso del producto
 ■ Sábana para reposicionamiento Comfort Glide ■ Cuña Comfort Glide
 ■ Protector ultra absorbente Comfort Glide

Cómo usar la sábana, las cuñas y el protector ultra absorbente Comfort Glide

- Despliega y colócala la sábana para reposicionamiento sobre el paciente. Alargala desde el pie al lado superior de la sábana con los hombros del paciente.
- Coloca el protector ultra absorbente Comfort Glide sobre la sábana de reposicionamiento, con la cara superior hacia abajo.
- Desliza las bandas de ambos lados largas sueltas para colarlas debajo del paciente.
- Coloca el protector ultra absorbente Comfort Glide sobre la sábana de reposicionamiento, con la cara superior hacia abajo.
- Desliza las bandas de ambos lados largas sueltas para colarlas debajo del paciente.
- Desliza las bandas de ambos lados largas sueltas para colarlas debajo del paciente.


Cómo usar las cuñas Comfort Glide

- Coloca la cuña sobre el paciente. Ajusta la altura de la cuña para que se ajuste al paciente.
- Coloca la cuña sobre el paciente. Ajusta la altura de la cuña para que se ajuste al paciente.
- Coloca la cuña sobre el paciente. Ajusta la altura de la cuña para que se ajuste al paciente.

Precauciones:
 1. Los componentes Comfort Glide no están diseñados para ser usados en pacientes con heridas abiertas o heridas de grado III.
 2. No se recomienda el uso de dispositivos de fijación de la cama para pacientes con heridas abiertas o heridas de grado III.
 3. Para obtener los mejores resultados, colar las cuñas y proyectores ultra absorbentes Comfort Glide.
 4. **ADVERTENCIA:** Si usa cuñas Comfort Glide, asegúrese de que el paciente esté correctamente posicionado sobre las cuñas.
 5. Coloque el paciente de acuerdo con el manual de instrucciones del paciente.

Para obtener más información sobre Comfort Glide, visite el sitio web de Medline en www.medline.com.

Árbol de decisiones

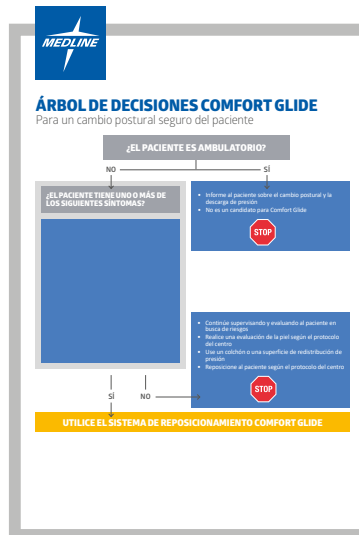

¿Quiere saber más? Póngase en contacto con su comercial de Medline o visítenos en nuestra página web: es.medline.eu



Medline International Iberia S.L.U
 Parque Empresarial San Fernando
 Edificio Munich, Planta Baja, local B
 Avenida de Castilla 2
 28830 San Fernando de Henares
 Madrid
 España
 Tfno: +34 900 600 602
 Fax: +34 900 600 603
es.medline.eu
es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  

References: **1** de Castro AB, Handle With Care®: The American Nurses Association's Campaign to Address Work-Related Musculoskeletal Disorders. The Online Journal of Issues in Nursing, 2004;9(3). Available at <http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableOfContents/Volume92004/No3Sept04/HandleWithCare.html> Accessed 2 October 2015. **2** Safe Patient Handling. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Available at <https://www.osha.gov/Publications/OSHA3708.pdf> Accessed 2 October 2015. **3** Boorman, 'NHS Health and Well-being Review' (2009). **4** Health and Safety Executive, 'Health and safety in the health and social care sector in Great Britain, 2014/15'. **5** Guest et al., 'Health economic burden that wounds impose on the National Health Service in the UK'. British Medical Journal (2015). **6** Gefen A, 'How much time does it take to get a pressure ulcer? Integrated evidence from human, animal, and in vitro studies'. (2008). **7** Data on file, available upon request. **8** Data on file, available upon request. **9** Safe Patient Handling. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Available at: www.osha.gov/SLTC/healthcarefacilities/safepatienthandling.html Accessed 26 April 2017. **10 - 16** Data on file, available upon request.

Los productos Comfort Glide son productos sanitarios no estériles de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.



Medline International France SAS
 5, rue Charles Lindbergh
 44110 Châteaubriant, France



Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pueda haberse producido.
 © 2021 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. ML868_ES 04/2021.