



## REOXCARE GEL

### FICHA TÉCNICA

Hidrogel para el tratamiento de la piel dañada.

Fabricado por:

histocell  
REGENERATIVE MEDICINE

Distribuido por:

cardiva®

### Reoxcare Gel

#### Descripción del producto

Reoxcare® Gel es un hidrogel amorfo estéril para el tratamiento de la piel dañada.

#### Composición

Agua purificada, glicerina, goma de garrofín, Carbopol, vitamina C, licopeno, vitamina E, cúrcuma, excipientes.

#### Modo de acción

El gran contenido de agua presente en Reoxcare® Gel le confiere unas excelentes propiedades hidratantes.

Reoxcare® Gel mantiene la humedad tanto en la zona dañada como en su entorno, favoreciendo su recuperación.

Reoxcare® Gel hidrata la piel dañada, promueve el desbridamiento del tejido no viable, limpia el lecho de la herida y promueve la curación.

#### Indicaciones

Reoxcare® Gel está indicado en el tratamiento de la piel dañada. Puede utilizarse en piel dañada o irritada, quemaduras, lesiones superficiales, cortes, abrasiones, incisiones/heridas quirúrgicas o piel seca.

Bajo la supervisión de un profesional sanitario, Reoxcare® Gel puede utilizarse también en heridas con una exudación de débil a moderada: úlceras por presión, úlceras venosas, úlceras causadas por etiologías vasculares mixtas, úlceras de pie de diabético.

#### Modo de empleo

Reoxcare® Gel es muy fácil de aplicar. Puede aplicarse directamente sobre la piel dañada. Aplicar una o dos veces al día. En caso de ser necesario, cubrir con un apósito secundario adecuado.

En el caso de lesiones que requieran la supervisión de un profesional sanitario:

- Limpiar la lesión con solución salina estéril.
- Apretar el tubo con suavidad manteniendo la boquilla apartada de la superficie de la lesión y aplicar una cantidad suficiente de gel a toda la lesión.
- Si se considera necesario, cubrir con un apósito secundario adecuado.
- Volver a aplicar el producto cada 24-48 horas.
- Reoxcare® Gel se retira fácilmente irrigando con solución salina estéril.

## **Precauciones y observaciones**

Reoxcare® Gel puede formar una película elástica y flexible sobre la piel que protege la zona dañada y que se retira con facilidad irrigando. En el inicio del tratamiento con Reoxcare® Gel puede parecer que la herida aumenta de tamaño. Esto es normal debido a su capacidad desbridante. No utilizar en caso de heridas muy exudativas. No dejar el producto en la herida durante más de 3 días consecutivos. Reoxcare® Gel solo debe utilizarse por vía tópica. Reoxcare® Gel es de un solo uso y no debe reutilizarse. La reutilización puede provocar riesgos de infección. No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes o a los derivados del tomate. En caso de síntomas de infección durante el uso de Reoxcare® Gel debe iniciarse el tratamiento de acuerdo al protocolo del centro sanitario. Se garantiza la esterilidad del producto a menos que el envase esté abierto o dañado. No utilizar en este caso.

## **Conservación**

Mantener a una temperatura inferior a 30 °C.

## **Contenido**

Cada caja contiene 3 tubos individuales de 12 g.