

Ficha Técnica Productos Voromed

Nombre del producto:	CHATEREEPLUS PAD
Producto sanitario y clase:	Producto Sanitario I estéril CE
Código Voronet:	HS 510
Revisión:	Edición 1 – 02/11/2023

» Descripción del producto:

Apósito de primeros auxilios que consta de una película de poliuretano delgada y transparente recubierta con adhesivo de poliuretano y una almohadilla de tela no tejida de polietileno.

» Características:


- **Adhesivo de gel de uretano:** alta permeabilidad a la humedad y buena adhesión.
- **Higiénico:** se puede aplicar sin tocar la almohadilla o la superficie adhesiva. La película de liberación se puede pelar fácilmente.
- **Almohadilla de alta absorbencia:** la almohadilla es 10 veces más absorbente que la gasa.
- **Almohadilla antideslizante para evitar la adhesión a las heridas:** la superficie de la almohadilla está cubierta con una película porosa de polietileno par que no sea pegajosa y proteja suavemente la herida.

» Indicaciones:

- **Fijación de agujas o catéteres**
- **Cubierta protectora de heridas**

» PRESENTACIONES DEL PRODUCTO:

REFERENCIA	TIPO DE ENVASE	CONTENIDO	TAMAÑO (mm)	EAN
CPSP0508	1 caja	50 unidades	50 x 80	4987167082116
CPSP0610	1 caja	50 unidades	60 x 100	4987167082123
CPSP0812	1 caja	25 unidades	80 x 120	4987167082130
CPSP0915	1 caja	20 unidades	90 x 150	4987167082147
CPSP0921	1caja	15 unidades	90 x 210	4987167082154
ESTERILIZACIÓN		Óxido de etileno		

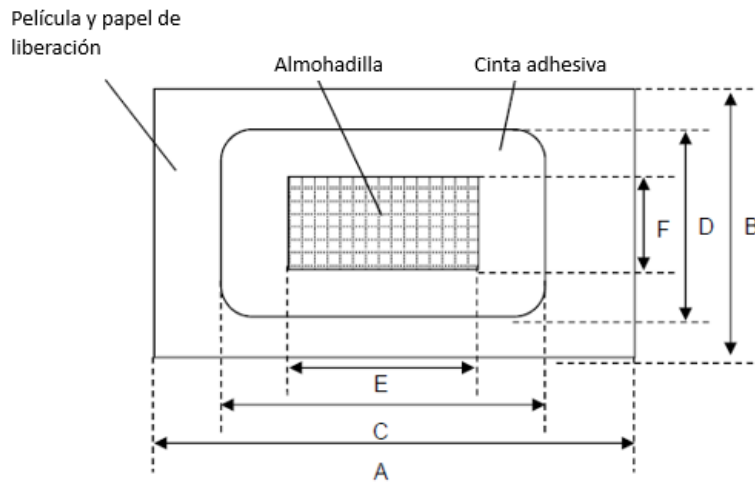

Producto	Tamaño					
	A	B	C	D	E	F
CPSP0508	145 mm	80 mm	80 mm	50 mm	50 mm	25 mm
CPSP0610	165 mm	91 mm	100 mm	60 mm	65 mm	30 mm
CPSP0812	190 mm	114 mm	120 mm	80 mm	80 mm	40 mm
CPSP0915	220 mm	130 mm	150 mm	90 mm	100 mm	50 mm
CPSP0921	280 mm	130 mm	210 mm	90 mm	160 mm	50 mm

» COMPOSICIÓN:

PRODUCTO	MATERIAL
Película de liberación	Polipropileno
Soporte	Película de polietileno
Adhesivo	Gel de uretano
Almohadilla	Polietileno con red no tejida
Soporte antiadherente	Papel siliconado

» INSTRUCCIONES DE USO:

• APLICACIÓN:

1. Lentamente despegar la película de liberación
2. Tape la herida y despegue la película de liberación restante y asegure el producto con una cinta
3. Despegue lentamente el soporte antiadherente
4. Adhesión del producto a la piel

- **CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:** almacenar a temperatura ambiente, lejos del agua, de altas temperaturas, alta humedad y de la luz directa del sol.

- **Fecha de Caducidad:** ver envase.

- **Vida útil:** un solo uso.

• **CONTRADICCIONES Y ADVERTENCIAS:**

- Si la herida está sucia, limpie la herida antes de aplicar el producto.
- Al aplicar el producto, presiónelo bien sobre la piel con las manos para evitar arrugas. Si hay alguna arruga que llega a la almohadilla, reemplace el producto con uno nuevo ya que la impermeabilidad se verá afectada. En particular, tenga cuidado al aplicar las articulaciones o curvas, ya que es más probable que se presenten arrugas.
- Antes de ducharse o tomar un baño, asegúrese de que toda la cinta adhesiva se adhiera bien a la piel para que el agua no pueda penetrar.
- Si los síntomas parecen ser infección o trastorno de la piel (erupciones, enrojecimiento, ampollas, descamación de la piel, picazón, etc.) en el sitio de la aplicación, suspenda el uso y tome el tratamiento adecuado.
- Si el producto se moja o se ensucia, pierde sangre o exudado, reemplácelo inmediatamente con uno nuevo.
- No utilizar el producto si el embalaje está sucio, dañado o mojado.
- Utilícelo inmediatamente después de abrir el paquete.
- Al retirar, despegar lentamente a lo largo del flujo del vello corporal para evitar daños en la piel.

• **SIMBOLOS ARMONIZADOS:**



Not made with natural rubber latex.



Don't keep only primary package.



• **FABRICANTE:**

Mfd & Exported by NICHIBAN CO.LTD | 2-3-3 SEKIGUCHI, BUNKYO-KU, YOKYO, 112-8663, JAPAN | Tel: +81(0)3-5978-5636 | Fax: +81(0)3-5978-289 | web: <http://www.nichiban.co.jp>

• **DISTRIBUIDOR:**

Voronet S.L. | c/ Santa Anna, 101 Nau A (Pol. Ind. La Clota) 08290 – CERDANYOLA DEL VALLÉS Barcelona (Spain) | Tel. + 34 93 594 75 | e-mail: voronet@voronet.com