


Ficha Técnica Productos Voromed

Nombre del producto:	CATHEREEPLUS I.V.
Producto sanitario y clase:	Producto Sanitario I estéril CE
Código Voronet:	HS 520
Revisión:	Edición 2 – 07/02/2024

» Descripción del producto:

Apósito con dos capas de cinta. Una capa exterior recubierta con una película de poliuretano elástico y transparente y una capa interna de poliuretano no tejido recubierto con un adhesivo acrílico. Lleva incluidas unas cintas de fijación de catéter recubiertas con silicona.

Cinta de capa exterior

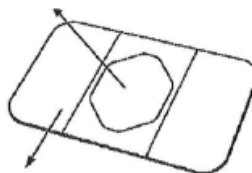

Cinta de capa interna

» Características:

- **Fácil posicionamiento al aplicar:** el sitio de punción es visible desde la “venta diamante”, por lo que se puede aplicar en la posición exacta.
- **Diseño sin soporte que permite aplicación ordenada:** la tela no tejida de poliuretano y altamente flexible permite que se adhiera firmemente a la piel sin espacio.
- **Fijación firme:** la cinta de fijación adjunta se puede aplicar sin tocar la superficie adhesiva, se puede manejar de forma higiénica y se puede aplicar con guantes.
- **Gran permeabilidad:** utiliza adhesivo de gel de uretano recientemente desarrollado, dando una alta permeabilidad y logra un tacto suave para la piel.


» Indicaciones:

- Fijación de agujas de inyección
- Fijación de sitios de inserción de catéter

» PRESENTACIONES DEL PRODUCTO:


REFERENCIA	TIPO DE ENVASE	CONTENIDO	TAMAÑO (mm)	EAN
IV0608	1 caja	35 unidades	60 x 80	4987167082185
IV0811	1 caja	30 unidades	80 x 110	4987167082192
ESTERILIZACIÓN		Óxido de etileno		

Cuerpo del producto

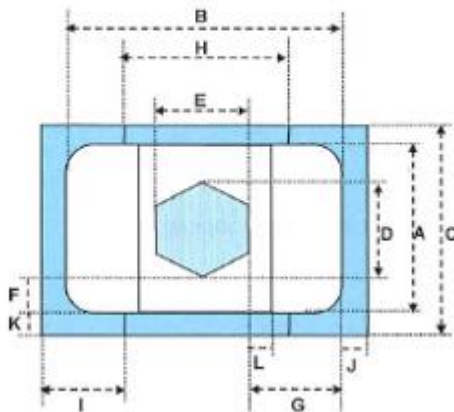

Tamaño	IV0608	IV0811
A	60 mm	80 mm
B	80 mm	110 mm
C	70 mm	90 mm
D	39 mm	51 mm
E	34 mm	44 mm
F	11 mm	15 mm
G	23 mm	33 mm
H	50 mm	65 mm
I	28 mm	28 mm
J	8 mm	5 mm
K	5 mm	5 mm
L	5 mm	6 mm

Cinta de fijación de catéter

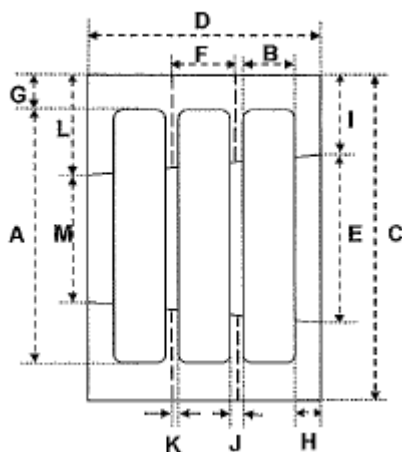

Tamaño	
A	80 mm
B	15 mm
C	95 mm
D	64 mm
E	53 mm
F	19 mm
G	8 mm
H	6 mm
I	21 mm
J	4 mm
K	2 mm
L	23 mm
M	49 mm

» **COMPOSICIÓN:**

PRODUCTO		MATERIAL
Ventana transparente	Soporte	Película de poliuretano
	Adhesivo	Gel de uretano
Soporte		Poliuretano sin tejer
Adhesivo		Adhesivo acrílico
Película de liberación		Polipropileno
Cinta de fijación auxiliar	Soporte	Película de polipropileno
	Adhesivo	Adhesivo acrílico
	Soporte antiadherente	Papel siliconado

» **INSTRUCCIONES DE USO:**

• **APLICACIÓN:**

1. Retirar lentamente la parte central de la película de liberación.
2. Colocar la parte de la ventana transparente en el sitio de punción y aplicar la cinta adhesiva.
3. Retirar los dos lados de la película de liberación y presionar firmemente para pegar el producto.
4. Aplicar la cinta de fijación del catéter para fijar el catéter según sea necesario.



- **CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:** Mantener seco y almacenar a temperatura ambiente, evitando el exceso de calor y humedad y la luz directa del sol.

- **Fecha de Caducidad:** ver envase.
- **Vida útil:** un solo uso.

• **CONTRADICCIONES Y ADVERTENCIAS:**

- Antes de su utilización, limpiar y secar el área alrededor del sitio de punción.
- Seleccionar el tamaño adecuado para su uso.
- No estire de la cinta, la cinta estirada puede causar problemas en la piel o puede desprenderse.
- Durante el uso del producto, si aparecen síntomas en el sitio aplicado como erupción, enrojecimiento, picazón, et. Detenga el uso del producto y proporcione el tratamiento adecuado.
- Durante el uso de este producto, siempre controle cuidadosamente que el catéter esté firmemente en su lugar, comprobar la cinta y reforzar la fijación o reemplazar el producto según sea necesario.
- Evite que el agua entre en el sitio de punción al ducharse, bañarse, etc. Si el agua entra en el sitio de punción, reemplace el producto.
- Retirar lentamente la cinta a lo largo de la línea del cabello para no dañar la piel.

- Retirar cuidadosamente la cinta mientras presiona el catéter y la piel; la extracción forzada de la cinta también puede quitar el catéter u otro aparato.
- No utilizar el producto si su embalaje está dujo, dañado o mojado.
- Utilícelo inmediatamente después de abrir el paquete.

• **SIMBOLOS ARMONIZADOS:**



Not made with natural rubber latex.



Don't keep only primary package.



• **FABRICANTE:**

Mfd & Exported by NICHIBAN CO.LTD | 2-3-3 SEKIGUCHI, BUNKYO-KU, YOKYO, 112-8663, JAPAN | Tel: +81(0)3-5978-5636 | Fax: +81(0)3-5978-289 | web: <http://www.nichiban.co.jp>

• **DISTRIBUIDOR:**

Voronet S.L. | c/ Santa Anna, 101 Nau A (Pol. Ind. La Clota) 08290 – CERDANYOLA DEL VALLÉS Barcelona (Spain) | Tel. + 34 93 594 75 | e-mail: voronet@voronet.com