

Ficha Técnica Productos Voromed

Nombre del producto:	CATHEREEPLUS ROLL
Producto sanitario y clase:	Producto Sanitario I no estéril CE
Código Voronet:	HS 501
Revisión:	Edición 2 – 18/12/2023

» Descripción del producto:

Apósito adhesivo de gel de uretano altamente permeable. Diseñado para permear el vapor de agua y el oxígeno y evitar la acumulación de la humedad en la piel o heridas. Puede cortarse a la longitud requerida para su uso. Producto no estéril.

» Características:

- **Alta permeabilidad a la humedad (3500 g/m² · 24h):** el adhesivo de gel de uretano tiene una permeabilidad a la humedad que es aproximadamente 5 veces mayor que los adhesivos acrílicos generales. Mantiene la piel cómoda incluso después de un largo período de aplicación, ya que reduce la congestión causada por la sudoración.
- **Adhesión firme:** dado que el adhesivo del gel de uretano se adhiere uniformemente en toda la superficie de la película, el adhesivo de gel se adhiere firmemente a la irregularidad de la piel. La película es flexible, por lo que sigue el movimiento de la piel se adhiere bien incluso si se aplica durante mucho tiempo.
- **Baja irritación:** la adhesión de gel de uretano apenas pela o daña la capa córnea de la piel. La película se estira bien, reduciendo el estrés en la piel, reduce la erupción y el dolor.
- **Película de liberación pre-levantada:** fácil de manipular incluso con guantes.
- **Reducción del estrés de la piel:** debido a la película elástica.
- **Evita que el agua y las bacterias entren desde el exterior**
- **Excelente deslizamiento, reduce la fricción con la ropa y las sábanas**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Fuerza adhesiva	0.57-1.17 N/15mm
Transmisión de vapor de humedad	≥2000 g/m ² · 24h

» Indicaciones:


- **Cubiertas de fijación para sostener gasas y apósitos**
- **Fijación de tubos y catéteres**
- **Revestimiento protector para la piel**
- **Para personas que usan estoma o CSPD, para reforzar y proteger el corsé al ducharse**

» PRESENTACIONES DEL PRODUCTO:

REFERENCIA	TIPO DE ENVASE	CONTENIDO	TAMAÑO (mm)	EAN
CPSR0510	1 caja	1 rollo	50 x 10	4987167082208
CPSR1010	1 caja	1 rollo	100 x 10	4987167082215
CPSR1510	1 caja	1 rollo	150 x 10	4987167082222


» COMPOSICIÓN:

PRODUCTO	MATERIAL
Película de liberación	Polipropileno
Soporte	Película de polietileno
Adhesivo	Gel de uretano
Soporte antiadherente	Papel siliconado

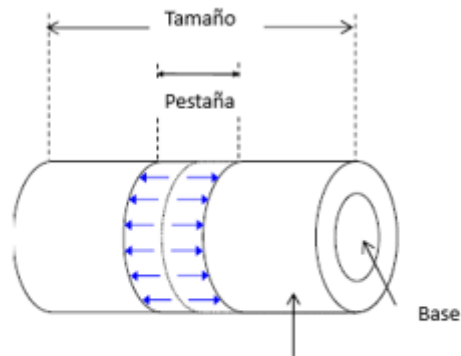


Cinta adhesiva y película de aplicación con soporte antiadherente

【CPSR0510】

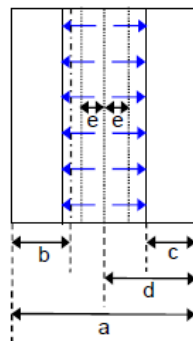

【CPSR1010, 1510】

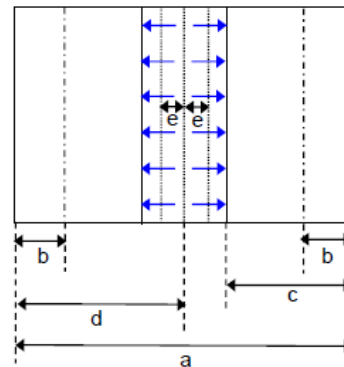


	Tamaño (mm)		
	CPSR0510	CPSR1010	CPSR1510
a	50	100	150
b	23	15	15
c	10	35	60
d	25	50	75
e	≥6		

» INSTRUCCIONES DE USO:

• APLICACIÓN:

1. Sacar la longitud requerida y cortar con tijeras
2. Quitar el soporte antiadherente en la parte central de la parte principal (línea de corte)
3. Mantener el borde restante del soporte antiadherente y aplicar el producto en su lugar
4. Despegar el soporte antiadherente restante y presionar firmemente el producto
5. Lentamente, quitar la película de liberación del borde indicado por las flechas
6. Quitar la película de liberación restante

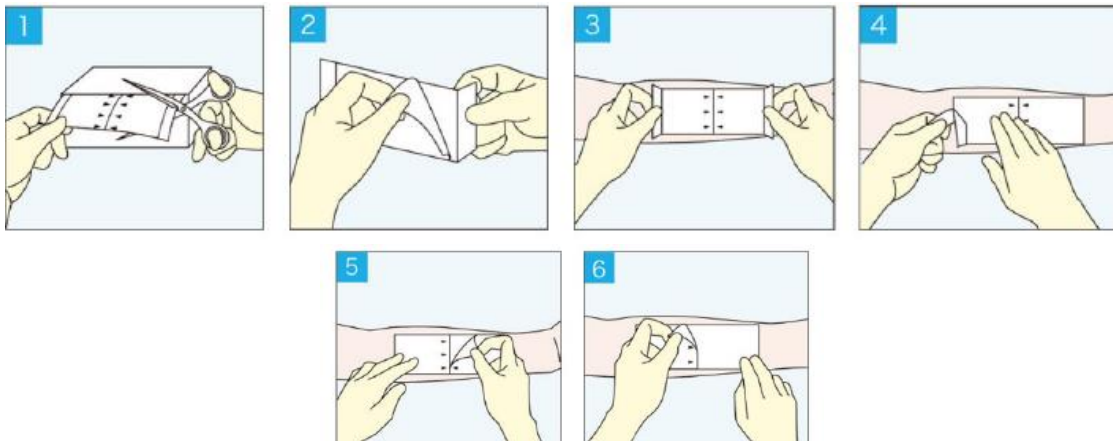

- **CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:** almacenar a temperatura ambiente, lejos del agua, de altas temperatura, alta humedad y de la luz directa del sol.

- **Fecha de Caducidad:** ver envase.
- **Vida útil:** un solo uso.

• CONTRADICCIONES Y ADVERTENCIAS:

- No utilizar directamente sobre una herida o sitio de la punción porque este producto no es estéril.
- No usar en áreas con una infección, sangrado, exudado, trastornos de la piel o metabolismo anormal de la piel.
- Este producto no puede utilizarse como sustituto de las suturas de fijación.
- Limpie bien la piel y compruebe que está limpia y seca antes de la aplicación.

- No aplicar con el producto extendido, ya que puede causar daños en la piel y descamación.
- Suspender el uso si se presenta un trastorno de la piel u otra anomalía.
- Si se determina clínicamente que la infección ha ocurrido, interrumpir el uso, tomar el tratamiento adecuado, y reanudar el uso después de que la infección haya desaparecido.
- Antes de ducharse o bañarse, asegúrese de que el producto está en pleno contacto con la piel.
- Al retirar, pelar lentamente a lo largo del flujo del vello corporal para evitar daños en la piel.
- Puede causar problemas de piel (erupción cutánea, enrojecimiento, ampollas, descamación, picazón, etc.)
- Puede causar infección

• **SIMBOLOS ARMONIZADOS:**



Not made with natural rubber latex.



Don't keep only primary package.



• **FABRICANTE:**

Mfd & Exported by NICHIBAN CO.LTD | 2-3-3 SEKIGUCHI, BUNKYO-KU, YOKYO, 112-8663, JAPAN | Tel: +81(0)3-5978-5636 | Fax: +81(0)3-5978-289 | web: <http://www.nichiban.co.jp>

• **DISTRIBUIDOR:**

Voronet S.L. | c/ Santa Anna, 101 Nau A (Pol. Ind. La Clota) 08290 – CERDANYOLA DEL VALLÉS Barcelona (Spain) | Tel. + 34 93 594 75 | e-mail: voronet@voronet.com