

Ficha Técnica Productos Voromed

Nombre del producto:	CATHEREEPLUS
Producto sanitario y clase:	Producto Sanitario I estéril CE
Código Voronet:	HS 500
Revisión:	Edición 1 – 31/10/2023

» Descripción del producto:

Apósito con un revestimiento de película altamente permeable a la humedad. Adhesivo de gel de uretano con alta permeabilidad, suavidad a la piel y alta adhesión.

» Características:


- **Alta permeabilidad a la humedad:** el adhesivo de gel de uretano tiene una permeabilidad a la humedad que es aproximadamente 5 veces mayor que los adhesivos acrílicos generales. Mantiene la piel cómoda incluso después de un largo período de aplicación porque reduce la congestión causada por la sudoración.
- **Adhesión firme:** el adhesivo de gel de uretano se recubre uniformemente en toda la superficie de la película y lo hace de manera firme en los relieves de la piel. La película flexible sigue los movimientos de la piel, logrando una adhesión estable y duradera.
- **Baja irritación y suave a la piel:** el adhesivo del gel de uretano apenas pella o daña la capa cornea al pelar. La película se estira bien, reduciendo el estrés en la piel. Reduce la erupción y el dolor al pelar.

» Indicaciones:

- **Fijación de catéteres y agujas de inyección**
- **Protección de heridas y cierre de la piel de la herida**

» PRESENTACIONES DEL PRODUCTO:


REFERENCIA	TIPO DE ENVASE	CONTENIDO	TAMAÑO (mm)	EAN
CPS0203	1 caja	30 unidades	25 x 30	4987167066734
CPS0405	1 caja	50 unidades	40 x 50	4987167061029
CPS0608	1 caja	35 unidades	60 x 80	4987167082079
CPS0811	1 caja	30 unidades	85 x 110	4987167082086
CPS1114	1 caja	25 unidades	110 x 140	4987167060961
CPS1820	1 caja	12 unidades	180 x 200	4987167060978
ESTERILIZACIÓN		Óxido de etileno		

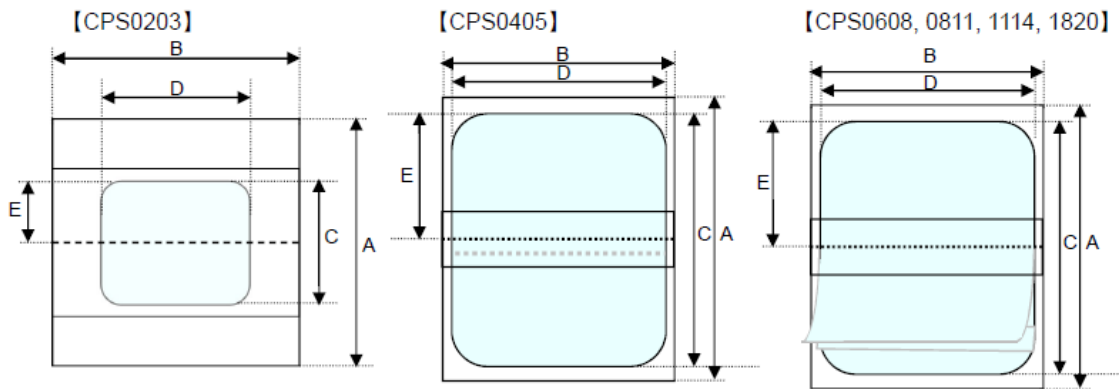

Tipo de Producto Unidad	Tamaño					
	CPS0203	CPS0405	CPS0608	CPS0811	CPS1114	CPS1820
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A	50	70	100	130	160	220
B	50	50	70	95	120	190
C	25	50	80	110	140	200
D	30	40	60	85	110	180
E	12.5	25	40	55	70	100

» **COMPOSICIÓN:**


PRODUCTO	MATERIAL
Película de liberación	Polipropileno
Soporte	Película de poliuretano
Adhesivo	Gel de uretano
Soporte antiadherente	Papel siliconado

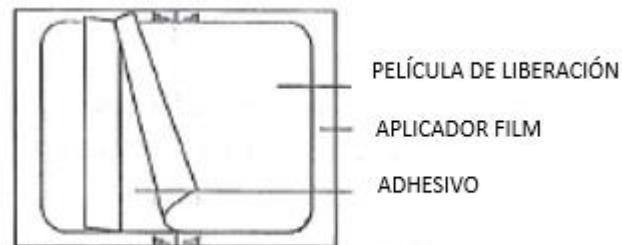

» INSTRUCCIONES DE USO:

• **APLICACIÓN:**

1. Quitar lentamente la película de liberación más grande.
2. Mantener el borde del producto con los dedos y aplicar la cinta adhesiva en el área adecuada.
3. Despegue la película de liberación restante y pegue firmemente toda la superficie adhesiva.
4. Quitar la aplicación film lentamente.

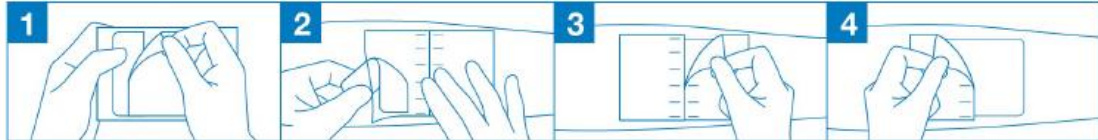

• **CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:** almacenar a temperatura ambiente, lejos del agua, de altas temperaturas, alta humedad y de la luz directa del sol.

- **Fecha de Caducidad:** ver envase.
- **Vida útil:** un solo uso.

• **CONTRADICCIONES Y ADVERTENCIAS:**

- No reutilizar.
- Si se produce una infección clínica en la herida durante el uso del producto, interrumpa el uso y trate la infección adecuadamente.
- Si los síntomas parecen ser trastornos de la piel (erupción/enrojecimiento, ampollas, descamación de la piel, picazón, etc.) durante el uso del producto, dejar de utilizarse y recibir el tratamiento adecuado.
- No utilice el producto si el embalaje está sucio, dañado o mojado.
- Utilice el producto inmediatamente después de romper el sello.
- Al retirar la almohadilla, quítela lentamente a lo largo del flujo del vello corporal para evitar daños en la piel.


- **SIMBOLOS ARMONIZADOS:**



Not made with natural rubber latex.



Don't keep only primary package.

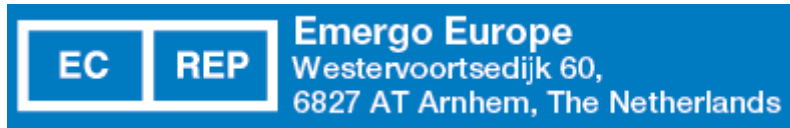

- **FABRICANTE:**

Mfd & Exported by NICHIBAN CO.LTD | 2-3-3 SEKIGUCHI, BUNKYO-KU, YOKYO, 112-8663, JAPAN | Tel: +81(0)3-5978-5636 | Fax: +81(0)3-5978-289 | web: <http://www.nichiban.co.jp>

- **DISTRIBUIDOR:**

Voronet S.L. | c/ Santa Anna, 101 Nau A (Pol. Ind. La Clota) 08290 – CERDANYOLA DEL VALLÉS Barcelona (Spain) | Tel. + 34 93 594 75 | e-mail: voronet@voronet.com