

Ficha Técnica Productos Voromed

Nombre del producto:	BARRA DE SILICONA ANSCARE LENISCAR
Producto sanitario y clase:	Producto Sanitario I CE
Código Voronet:	HS800
Revisión:	Edición 2 – 07/03/2024

» Descripción del producto:

Barra de silicona que proporciona un tratamiento tópico, fácil de usar para las cicatrices. Consta de una fórmula avanzada que contiene silicona de calidad médica y vitaminas antioxidantes C y E.

» Características:

- **Creación de una película** delgada impermeable y transparente que ayuda a mantener el equilibrio de humedad de la piel.
- **Barrera protectora** óptima para la restauración de la cicatriz.
- **12 horas** de tratamiento hidratante de larga duración.

» Indicaciones:

- **Prevención de cicatrices y queloides hipertróficos** producidos por lesiones de cirugía, cesáreas, quemaduras, cortes, arañazos, acné, picaduras de insectos, etc.
- **Cicatrices en:** cara, cuello, articulaciones, codos, tobillos y zona de la cicatriz cubierta de pelo.

» PRESENTACIONES DEL PRODUCTO:

TIPO DE ENVASE	CONTENIDO	TAMAÑO	EAN
Stick de Silicona	1 unidad	4 g	4719745505058
Stick de Silicona	1 unidad	9,2 g	4719745504525

» COMPOSICIÓN:

Los componentes que presenta LeniScar son:

- Polidimetilsiloxano
- Elastómero de silicona
- Cera de petróleo
- Tetra 2-hexildecanoato de ascorbilo
- Acetato de tocoferol

Mecanismo de acción: La fórmula de vitaminas C y E absorbe la luz en el espectro UVB, lo que ayuda a restaurar rápidamente la función de barrera protectora de la piel.

» **INSTRUCCIONES DE USO:**

• **APLICACIÓN:**

1. Comprobar que el área esté limpia y seca antes de cada aplicación
2. Aplicar la barrera de silicona LeniScar sobre toda la cicatriz en la misma dirección
3. Repetir dos o tres veces al día durante ocho a doce semanas seguidas o hasta que la cicatriz deje de responder
4. Par eliminar basta con lavar con jabón suave o un limpiador neutro

• **CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:** guardar entre 15-35°C, protegido de la luz solar directa, el calor y la humedad.

- **Fecha de Caducidad:** ver envase.
- **Vida útil:** 36 meses desde su apertura.

• **CONTRADICCIONES Y ADVERTENCIAS:**

- Solo para uso externo.
- No utilizar en heridas abiertas o piel no cicatrizada.
- Evitar el contacto con los ojos y mucosas.
- Si se produce irritación o reacción alérgicas, interrumpir la aplicación y consultar al médico.
- Informar a BenQ Materials Corporation, a su representante autorizado y a la autoridad competente del Estado miembro de residencia del usuario o el paciente si se produce algún incidente grave relacionado con el producto.

• **SIMBOLOS ARMONIZADOS:**



• **FABRICANTE:**

BenQ Materials Corporation (BenQ Group Company) | 29 Jianguo E.Road, Gueishan, Taoyuan, Taiwan, R.O.C. | Tel. +886-3-3748800 | Fax +886-3-3748888 |

• **DISTRIBUIDOR:**

Voronet S.L. | c/ Santa Anna, 101 Nau A (Pol. Ind. La Clota) 08290 –CERDANYOLA DEL VALLÉS Barcelona
(Spain) | Tel. + 34 93 594 75 80 | e-mail: voronet@voronet.com |