

Ficha Técnica Productos Voromed

Nombre del producto:	STEPTY P
Producto sanitario y clase:	Producto sanitario I estéril CE
Código Voronet:	HS351
Revisión:	Edición 1 – 20/10/2023

» Descripción del producto:

Vendaje adhesivo con una almohadilla para la hemostasia a presión. Hemostasia después de la retirada de la aguja en la arteria radial o en la arteria dorsal del pie.

» Características:


- **Alta astricción:** la almohadilla consiste en una placa de 9 mm de espesor que proporciona un alto efecto hemostático ya que presuriza un sitio de punción con eficacia y el propileno de la placa sirve para mantener una presión eficiente.
- **Etiquetas adhesivas:** adjunta etiquetas disponibles para grabar la hora de inicio de STEPTY P y evitar de este modo su uso prolongado.
- **Aplicación higiénica:** el dispositivo se puede aplicar en un sitio de punción sin tocar la almohadilla ni el área adhesiva. La parte plegada del foro de liberación se agranda para una extracción más fácil. Cada cinta se esteriliza individualmente antes del envasado.

» Indicaciones:

- **Hemostasia y cobertura protectora después de la punción de la arteria radial o la arteria dorsal del pie**
- **Medición de presión**
- **Medición de gases en sangre**

» PRESENTACIONES DEL PRODUCTO:

TIPO DE ENVASE	CONTENIDO	TAMAÑO (mm)	EAN
1 caja	30 unidades	Cinta adhesiva: 40 x 120 Almohadilla: 27 x 15 Área de placa: 36 x 30	4987167071660
ESTERILIZACIÓN	Óxido de Etileno		

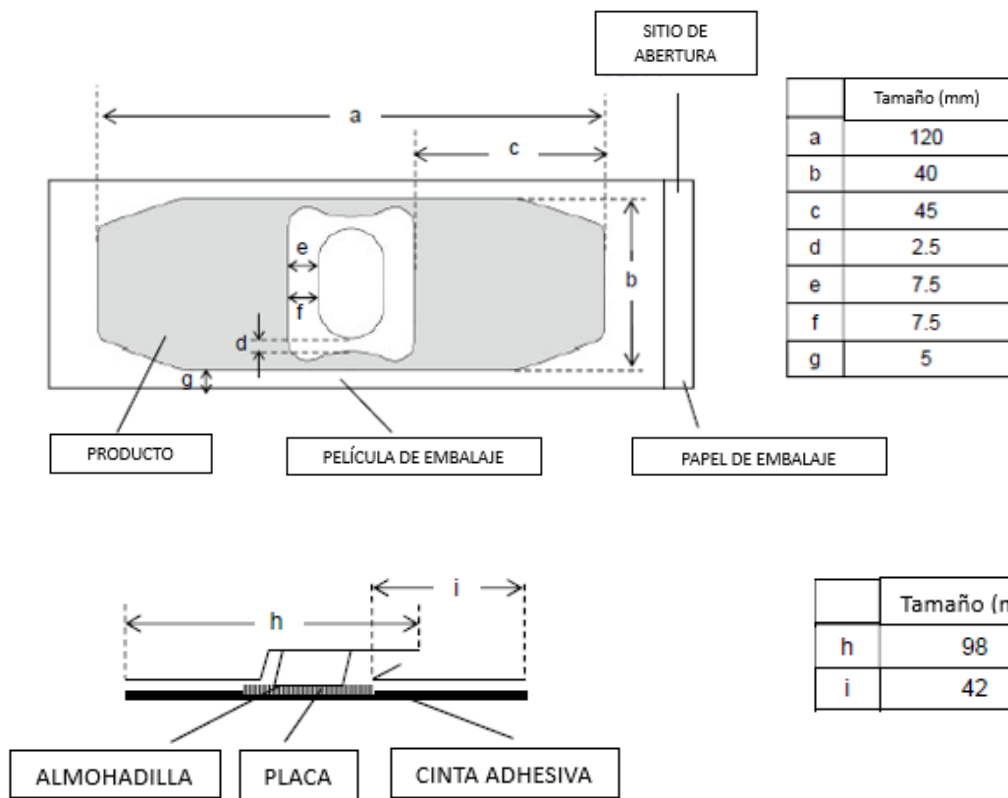

» COMPOSICIÓN:

PRODUCTO	CONTENIDO
Cinta adhesiva	Tela no tejida de uretano con adhesivo acrílico
Almohadilla	Celulosa, rayón, almohadilla de tela no tejida de polietileno
Placa	Placa de polipropileno

Mecanismo de acción: efecto hemostático en el sitio de punción basado en la presión generada en la almohadilla hemostática que permanece fija gracias a la cinta adhesiva elástica que contiene.

» INSTRUCCIONES DE USO:

• APLICACIÓN:


1. Sacar STEPTY P y pasar ligeramente la cinta por la parte cóncava de la placa central con la yema de los dedos, para comprobar fácilmente la zona de la almohadilla hemostática.
2. Aplicar la superficie de la almohadilla hemostática a los sitios de punción cutánea y acceso vascular y luego retirar la aguja residente mientras se coloca el pulgar en la parte posterior de la almohadilla hemostática.
3. Comprimir firmemente la almohadilla hemostática con el pulgar, quitar parcialmente el papel de la cinta adhesiva en el lado cubital mientras se comprime continuamente.
4. Mientras se continúa comprimiendo la almohadilla hemostática firmemente, estirar la cinta adhesiva alrededor del ancho del su pulgar aproximadamente 2 cm.

5. Mientras se continúa comprimiendo la almohadilla hemostática firmemente, fijar la parte estirada de la cinta adhesiva a la piel con seguridad.
 6. Comprimir firmemente la almohadilla hemostática con el otro pulgar teniendo cuidado no mover la almohadilla.
 7. Mientras se continúa comprimiendo la almohadilla hemostática firmemente, retirar parcialmente el papel y estirar la cinta adhesiva en el otro lado por aproximadamente 2 cm. Luego fijar el resto de cinta adhesiva.
 8. Una vez aplicada la almohadilla, fijarla en su lugar envolviéndola con cinta.
 9. Colocar etiqueta en la parte superior de STEPTY P indicando el tiempo de uso del producto.
- **CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:** almacenar a temperatura ambiente, lejos del agua, de altas temperaturas, de alta humedad y luz solar directa.
 - **Fecha de Caducidad:** el producto permanece estable tras 60 meses después de su esterilización. Ver envase.
 - **Vida útil:** 2 horas después de su puesta.
 - **CONTRADICCIONES y ADVERTENCIAS:**
 - La reutilización del producto está prohibida.
 - Si la herida se infecta clínicamente al usar el producto, detenga y conduzca adecuadamente el tratamiento.
 - Si los síntomas parecen ser trastornos de la piel (erupción/enrojecimiento, ampollas, descamación de la piel, etc.) en el sitio de aplicación, dejar de usar y tomar el tratamiento adecuado.
 - Asegúrese de quitar la aguja antes de aplicar este producto para evitar daños en los vasos sanguíneos y la piel.
 - Estirar la cinta más allá de la longitud requerida para la compresión causará un tirón excesivo de la piel y puede causar irritación de la piel.
 - Para evitar la irritación de la piel, retire este producto dentro de 2 horas de su aplicación.
 - El producto siempre debe ser retirado por un médico o una enfermera después de su uso.
 - Al retirar el producto, asegúrese de que no haya sangrado durante varios minutos mientras descansa y que se forme la hemostasis. Si la hemostasis es insuficiente, tomar las medidas adecuadas, tales como la presión manual.
 - Después de la extracción, proteja el área de punción con cobertura para prevenir la infección.
 - Si el producto se moja o se ensucia durante el uso, quítelo y aplique una compresa fresca inmediatamente.
 - No utilice el producto inmediatamente después de romper el sello.
 - Al retirar la almohadilla, quítela lentamente a lo largo del flujo del vello corporal para evitar daños en la piel.

- **SIMBOLOS ARMONIZADOS:**

Made in Japan

STERILE EO Sterilized by E.O.G.

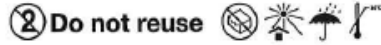

- **FABRICANTE:**

Mfd & Exported by NICHIBAN CO.LTD | 2-3-3 SEKIGUCHI, BUNKYO-KU, YOKYO, 112-8663, JAPAN | Tel: +81(0)3-5978-5636 | Fax: +81(0)3-5978-289 | web: <http://www.nichiban.co.jp>

- **DISTRIBUIDOR:**

Voronet S.L. | c/ Santa Anna, 101 Nau A (Pol. Ind. La Clota) 08290 – CERDANYOLA DEL VALLÉS Barcelona (Spain) | Tel. + 34 93 594 75 | e-mail: voronet@voronet.com