

STEPTY™ P

Apósito hemostático compresivo con almohadilla de astringción



Apósito hemostático con almohadilla de 9mm para hemostasia a presión, después de la extracción de la aguja permanente en la arteria radial o la arteria pedia.



Su almohadilla de 9 mm de espesor, con una placa de compresión comprime y fija el área de punción, proporcionando un alto efecto hemostático.



Stepty™ P de Nichiban está fabricado en Japón y tiene el certificado CE. Los apósitos se suministran dentro de envases individuales esterilizados, en caja de cartón.

● CARACTERÍSTICAS

- » Una almohadilla de 9mm que presuriza la piel con suavidad y eficacia.
- » Un plato con mayor presión y seguridad.
- » Apósito que se estira en todas las direcciones y soporta suficiente presión.
- » Ahorro de tiempo y reducción de esfuerzos para la curación y enfermería.
- » Embalajes individuales esterilizados después de su envasado diseñados para una fácil apertura y rápida extracción del producto.
- » Normalmente se usa para segmentos arteriales de calibre 14~24 (promedio)
- » Hecho en Japón para una calidad en la que puede confiar.



La presión ejercida por las cintas adhesivas de tela de uretano no tejida aumenta con la longitud de la cinta aplicada.

Unos 2 cm de cinta de cada lado ejercerán un nivel eficiente de presión (Aprox. 100 mmHg), manteniendo su tasa de elongación superior al 80% proporcionando un excelente efecto compresivo.

● APLICACIÓN



1 » Sacar el STEPTY P, pasar ligeramente la cinta por la parte cóncava de la placa central con la yema de los dedos, para marcar la zona de la almohadilla.



2 » Coloque la almohadilla para cubrir tanto la piel perforada como el vaso sanguíneo, y retire las agujas permanentes, etc., sujetando la superficie superior de la almohadilla con el dedo pulgar.



3 » Aplique una presión firme en la superficie superior de la almohadilla con el con el dedo (pulgares) de apoyo después de sacar la aguja.



4 » Mientras continúa aplicando una presión firme para que la almohadilla no se deslice, estire la cinta adhesiva alrededor del ancho de su pulgar aproximadamente 2 cm.



5 » Presione firmemente la almohadilla y manténgala quieta mientras estira la cinta adhesiva hasta la longitud de su pulgar y la adhiere firmemente a la piel.



6 » Tenga cuidado de no mover la almohadilla cuando reemplace el pulgar de presión con el otro pulgar y continúe aplicando una presión firme.



7 » Continúe aplicando una presión suave mientras retira parcialmente el otro forro, estire la cinta adhesiva unos 2 cm y péguela firmemente sobre la piel. Luego, despegue el resto del forro y péguelo.



8 » Una vez aplicada, la almohadilla se fija en su lugar envolviéndola con cinta.

● PRECAUCIONES

No reutilizar el producto

- » Si las heridas se infectan clínicamente mientras usa el producto, suspenda su uso y busque el tratamiento adecuado.
- » Si desarrolla lesiones en la piel mientras usa el producto, suspenda su uso y busque el tratamiento adecuado.
- » Saque siempre la aguja antes de colocar el producto para evitar dañar la piel o los vasos sanguíneos.
- » Tenga en cuenta que el uso prolongado de las cintas de presión creará una tensión excesiva que causará estrés en la piel.
- » Le sugerimos retirar el producto en aprox. 2 horas para evitar el estrés en la piel.
- » El producto siempre debe ser retirado por un médico o una enfermera después de su uso.
- » Al retirar las cintas, mantenga el área encintada y el propio paciente en reposo y obsérvelos durante unos minutos para asegurarse de que el sangrado se haya detenido por completo.

- » Si la presión no es suficiente, aplique las medidas adecuadas, como la hemostasia por presión con las manos.
- » Cubra y proteja el sitio al sacar la aguja para evitar infecciones después de la extracción. En caso de que el producto se moje o se manche, quítelo y aplique una almohadilla nueva inmediatamente.
- » Si el paquete del producto está dañado, roto o mojado, evite usarlo.
- » El producto debe usarse inmediatamente después de romper el sello.
- » Retire la almohadilla lentamente a lo largo del flujo de su vello corporal para prevenir lesiones en la piel al retirarlo.

Cómo almacenar este producto

- » Almacenar a temperatura ambiente, lejos del agua, altas temperaturas, alta humedad y luz solar directa.